

EINFACH ABZULESENDES STIRNTHERMOMETER

ANWEISUNGEN

Thermometer sollten in Innenräumen und bei Raumtemperatur (ca. 20 °C - 30 °C) verwendet werden. Vermeiden Sie bei der Temperaturmessung direkte Sonneneinstrahlung oder starke Hitze. Nehmen Sie keine Temperaturmessung vor, wenn die Person innerhalb der letzten 30 Minuten gegessen, getrunken oder Sport getrieben hat, da die Möglichkeit von Temperaturschwankungen besteht.

1. Thermometer von der Unterlage abziehen und auf die saubere / trockene Stirn auflegen. Die Farbentwicklung beginnt innerhalb von 15 Sekunden.

2. Thermometer auf der Stirn ablesen:

- Grün: korrekte Temperatur
- Wenn Sie keine grüne Farbe sehen, erscheint entweder Blau oder Hellbraun:
Blau: 0,38 °C hinzufügen
Hellbraun: 0,38 °C abziehen

**KONSULTIEREN SIE BEI
FIEBER IMMER IHREN ARZT.**

**NUR ZUR BENUTZUNG DURCH
ERWACHSENE. NICHT IN REICHWEITE
VON KINDERN AUFBEWAHREN.**

