

THERMOMETRES FRONTAUX FACILES A LIRE

MODE D'EMPLOI

Les thermomètres devraient être utilisés à l'intérieur et à température ambiante (environ 68° - 86 °F, 20° - 30 °C). Evitez les rayons du soleil ou les fortes chaleurs pendant que vous prenez la température. Ne prenez pas la température si la personne a mangé, bu, ou fait de l'exercice au cours de la dernière demi-heure, en raison des possibles fluctuations de température.

1. Décollez la pellicule adhésive et mettre le thermomètre sur le front propre et sèche. La couleur commencera à se développer en 15 secondes.

2. Lisez le thermomètre sur le front :

- Vert : température correcte
- Si vous ne voyez pas le vert, la couleur bleue, ou beige va apparaître :

Bleu : ajouter 1 °F

Beige : soustrayez 1 °F

**CONSULTEZ TOUJOURS VOTRE
MEDECIN EN CAS DE FIEVRE.**

**A UTILISER PAR DES ADULTES UNIQUEMENT.
TENEZ HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS**

