

LEITURA FÁCIL TERMÔMETROS DE TESTA

INSTRUÇÕES

Os termômetros devem ser usados em ambientes internos e à temperatura ambiente (aproximadamente 68° - 86°F). Evite luz solar direta ou calor forte ao medir a temperatura. Não meça a temperatura se a pessoa esteve a comer, beber ou a fazer exercício nos 30 minutos anteriores à medição, devido à possibilidade de flutuação da temperatura.

1. Retire o termômetro do suporte e aplique na testa limpa / seca.

A cor começará a mudar no espaço de 15 segundos.

2. Leia o termômetro enquanto ainda está na testa:

- Verde: temperatura correta
- Se não vir a cor verde irão aparecer a cor azul ou castanho:
Azul: adicione 1°F
Castanho: subtraia 1°F

**CONSULTE SEMPRE O SEU
MÉDICO EM CASO DE FEBRE.**

**A SER ADMINISTRADO APENAS POR ADULTOS.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

