

НАЛОБНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ С УДОБНОЧИТАЕМЫМ ДИСПЛЕЕМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Термометры следует использовать в помещении и при комнатной температуре (примерно 68° - 86°F). При измерении температуры тела не допускайте воздействия прямого солнечного света и высоких температур. Не измеряйте температуру, если человек принимал пищу, употреблял жидкости или тренировался в течение последних 30 минут из-за возможных колебаний температуры тела.

1. Отклейте термометр от подкладки и наклейте на чистую/сухую кожу лба. Цвет начнёт проявляться в течение 15 секунд.

2. Считайте показание термометра, не отклеивая его ото лба:

- Зелёный: точная температура
- Если вы не видите зелёный цвет, проявится голубой или бежевый цвет:
Голубой: добавьте 1°F
Бежевый: отнимите 1°F

**ВСЕГДА ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
ТЕЛА ОБРАЩАЙТЕСЬ К СВОЕМУ
ЛЕЧАЩЕМУ ВРАЧУ.**

**ПОДЛЕЖИТ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТОЛЬКО
ВЗРОСЛЫМИ. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.**

